

Jak mohu propojit váhu s aplikací My TANITA App?

Pokud jste zařízení dříve spárovali a naměřené hodnoty se ukládají do aplikace, ale nyní je nelze spárovat:

- Zkontrolujte aktualizace v Appstore nebo Playstore a nainstalujte dostupné aktualizace.
 - Povolte Bluetooth v telefonu, poté nechte nastavení Bluetooth v telefonu a pokračujte v aplikaci.
 - Otevřete aplikaci My Tanita Healthcare.
 - Přejděte na kartu "moje zařízení" v nabídce.
 - Smažte (všechny) spárované zařízení kliknutím na ikonu odpadkového koše. Vaše naměřená data budou uložena.
 - Přejděte v menu na záložku "Moje měření".
 - Vyberte správný typ zařízení v horní části, pokud nezobrazuje ten správný.
 - Stiskněte tlačítko "start measurement".
 - Stiskněte tlačítko "zahájit párování".
 - Stiskněte a podržte tlačítko "set/pairing" / "O" na zařízení (nezapínejte nejprve váhu).
 - Po navázání připojení postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Ujistěte se, že boty a ponožky jsou zuté, nohy jsou suché a že zařízení je na tvrdém a rovném povrchu (bez koberce).

Podívejte se na přílohu pro průvodce krok za krokem se snímky obrazovky aplikace

Pokud se zařízení po provedení těchto kroků nedokáže připojit k telefonu, zkuste z telefonu odstranit celou aplikaci a znovu ji nainstalovat.

Pokud zařízení stále není schopno navázat připojení k telefonu ani po provedení těchto kroků, zkuste vyměnit baterie váhy za nové. Někdy je signál příliš slabý, když se baterie vybijí a výměna baterií může tento problém vyřešit

Když chcete zařízení spárovat s (novým) telefonem poprvé:


- Stáhněte si a nainstalujte aplikaci My Tanita Healthcare do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
 - Povolte Bluetooth v telefonu, poté nechte nastavení Bluetooth v telefonu a pokračujte v aplikaci.
 - Otevřete aplikaci My Tanita Healthcare a stiskněte tlačítko "spárovat mé zařízení".
 - Vyberte typ zařízení, se kterým chcete provést párování.
 - Když jste vybrali správné zařízení, stiskněte tlačítko "Spustit párování".
 - Stiskněte a podržte tlačítko "set/pairing" / "O" na zařízení (nezapínejte nejprve váhu).
 - Po navázání připojení postupujte podle pokynů v aplikaci.
- Ujistěte se, že boty a ponožky jsou zuté, nohy jsou suché a že zařízení je na tvrdém a rovném povrchu (bez koberce).

Podívejte se na přílohu pro průvodce krok za krokem se snímky obrazovky aplikace


1. Jděte na MOJE MĚŘENÍ v hlavním menu



2. Ujistěte se, že je vybrán správný typ váhy, případně jej přepněte

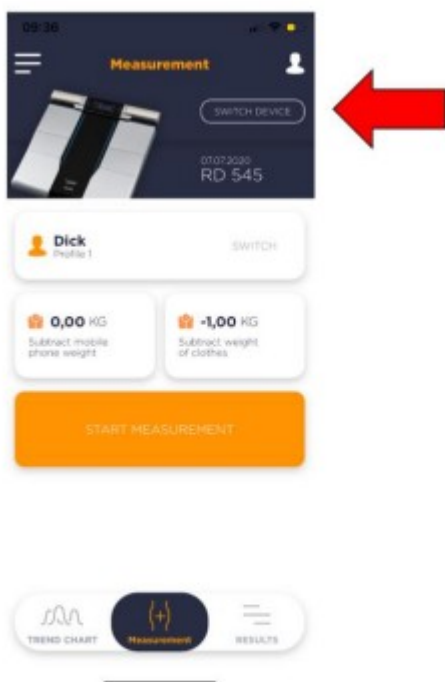

3. Stiskněte tlačítko ZAČÍT MĚŘENÍ

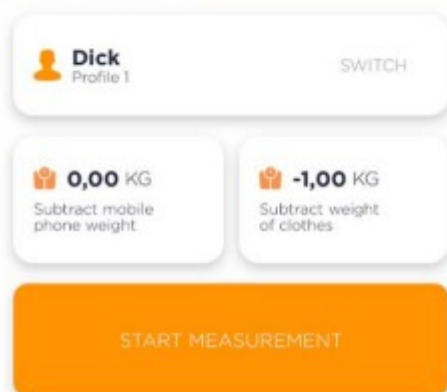

4. Nyní stiskněte tlačítko 'O' (u BC-401 tlačítko SET/PAIRING) na váze a čekejte, dokud se nezobrazí detaily Vašeho profilu na displeji.
5. Nyní uvidíte zprávu „VSTUPTE“.
6. Nastupte na váhu a získejte naměřené hodnoty, budou ihned zobrazeny v aplikaci.